

CeloTest - Fluo

Nombre Comercial:
CeloTest - Fluo

Descripción:
Emulsión acrílica estirenada al 0,5% pigmentos y agentes de formulación c.s.p. 100g.
Se sugiere el asesoramiento y orientación profesional para una correcta utilización e interpretación de los resultados.

Indicaciones de uso:
Método de ayuda para identificar y detectar animales (vaquillonas o vacas) en celo natural o inducido.
El producto debe conservarse en lugar seco, al abrigo de la luz y bien tapado, a una temperatura entre 5 °C y 30 °C.
Agite antes de usar.

Requerimientos para un correcto uso:
Limpiar correctamente la zona quitando el pelo suelto.
Pintar con Celo-Test una franja de 15 a 20 cm de largo por 5 cm de ancho en la zona sacro-coccígea.
El estro (celo) es indicado por la pérdida de la franja pintada. Cuando dicha pérdida es mayor al 30% significa que el animal está en celo.

Sugerencias para mayor beneficio:
1. Rojo: Detectar celos posparto (próximo primer celo).
2. Amarillo: Identificar vacas aptas para servicio.
3. Verde: Presumir posible gestación (franja pintada intacta luego de 24 días post servicio).
4. Celeste: Detectar mortalidad embrionaria y/o abortos.

Producto de venta sin receta, en locales con Asesoramiento Profesional Veterinario.
Los envases utilizados deberán descartarse de acuerdo con la legislación local vigente.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION TM

PhibroAnimalHealthdeArgentinaS.R.L.:
Rutherford4503-GrandBourg(B1615GYC)-Pcia.Bs.As.
Tel./Fax:(03327)44-4567-
info.phibroarg@pahc.com
www.phibrosaludanimal.com
ARG-MAY2022

HEALTHY ANIMALS.
HEALTHY FOOD.
HEALTHY WORLD.®