

# CeloTest Original

**Nombre Comercial:**  
CeloTest Original

**Descripción:**  
Pigmentos, agentes ligantes, dispersantes y emulsionantes, en suspensión acuosa.  
Se sugiere el asesoramiento y orientación profesional para una correcta utilización e interpretación de los resultados.

**Indicaciones de uso:**  
Método de ayuda para identificar y detectar animales (vaquillonas o vacas) en celo natural o inducido.  
El producto debe conservarse en lugar seco, al abrigo de la luz y bien tapado, a una temperatura entre 15 °C y 25 °C.

**Requerimientos para un correcto uso:**  
Limpiar correctamente la zona quitando el pelo suelto.  
Pintar con Celo-Test una franja de 15 a 20 cm de largo por 5 cm de ancho en la zona sacro-coccígea.  
El estro (celo) es indicado por la pérdida de la franja pintada. Cuando dicha pérdida es mayor al 30% significa que el animal está en celo.

**Sugerencias para mayor beneficio:**  
1. Rojo: Detectar celos posparto (próximo primer celo).  
2. Amarillo: Identificar vacas aptas para servicio.  
3. Verde: Presumir posible gestación (franja pintada intacta luego de 24 días post servicio).  
4. Celeste: Detectar mortalidad embrionaria y/o abortos.

Producto de venta sin receta, en locales con Asesoramiento Profesional Veterinario.  
Los envases utilizados deberán descartarse de acuerdo con la legislación local vigente.  
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos  
Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

**Phibro**  
ANIMAL HEALTH CORPORATION™

PhibroAnimalHealthdeArgentinaS.R.L.  
Rutherford4503-GrandBourg(B1615GYC)-Pcia.Bs.As.  
Tel./Fax:(03327)44-4567-  
info.phibroarg@pahc.com  
www.phibrosaludanimal.com  
ARG-MAY2022

HEALTHY ANIMALS.  
HEALTHY FOOD.  
HEALTHY WORLD.®